

CORONAVÍRUS

INFORMAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DE LUVAS PARA PREVENIR CONTAMINAÇÕES

A utilização de luvas promove uma barreira de proteção eficaz reduzindo o risco de contaminação das mãos por contacto com superfícies ou objetos contaminados. As mãos devem ser desinfetadas com gel desinfetante/lavadas com sabão antes e depois de utilizadas.

Como calçar as luvas



Higienize as mãos e retire uma luva da caixa original.



Toque somente na superfície da luva correspondente ao punho (na extremidade superior do punho).



Coloque a primeira luva.



Pegue a segunda luva com a mão não enluvada, tocando somente na superfície da luva correspondente ao punho.



Com a mão enluvada, segure, com a ponta dos dedos da mão enluvada, a superfície externa da luva a ser calçada e puxe delicadamente em direção ao punho.




As mãos enluvadas não devem tocar em nada que não esteja definido como indicação para o uso de luvas.

Como retirar as Luvas



Segure uma luva pela parte externa, na altura do punho e puxe em direção à ponta dos dedos. A luva sairá do avesso.

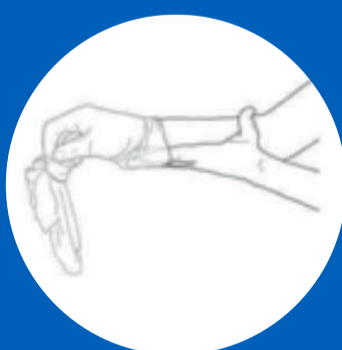

Segure a luva removida com a outra mão enluvada. Coloque os dedos da mão não enluvada na parte interna da luva (entre a luva o punho). Remova a segunda luva, arrastando-a em direção à ponta dos dedos e da outra luva.



Descarte as luvas em lixo infectaste, e higienize as mãos.