

CORONAVÍRUS

PROCEDIMENTOS PARA MEDIÇÃO DE FEBRE A COLABORADORES

O(s) colaborador(es) que procedem à medição da febre deve(m) colocar, antes de iniciar, óculos com proteção lateral, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, podendo ainda utilizar um fato do tipo “Tyvek”, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, antes e após contacto com os colaboradores. Não encostar o termómetro à testa, em caso de contacto higienizar o aparelho.

Termómetro de infravermelhos



Cuidado com os campos magnéticos

É importante saber: os termómetros de infravermelhos são sensíveis a campos magnéticos e humidade, e é indispensável que se afaste de telemóveis, televisões e consolas.

Deixe-o ambientar

Antes de medir a temperatura com o termómetro de infravermelhos é boa prática deixar ambientar o dispositivo no local onde se encontra. Não é necessário muito tempo: aguarde 15 minutos antes de medir a temperatura. Não invalida a consulta do manual do fabricante.

Medir na testa

No momento da medição na testa, o colaborador terá que estar imóvel.